

# GUIDE D'UTILISATION :

## Rollator **MOKA** (SA1303601)




Vous venez d'acquérir un produit de Drive DeVilbiss Healthcare France : le rollator 4 roues MOKA ; nous vous en remercions et vous félicitons de ce choix. Nous vous convions à lire ce guide d'utilisation et d'entretien afin de mieux connaître les performances et les qualités de ce rollator.

**Mise en garde :** La corrélation entre la pathologie du patient et le type de produit à utiliser doit être faite par un professionnel de santé. Ne pas utiliser le rollator avant d'avoir reçu, de la part du professionnel, une formation et des consignes de sécurité.

### AVERTISSEMENT :

- Seuls les patients dont le poids **n'excède pas 120 kg** peuvent utiliser ce rollator.
- L'utilisation sur un sol irrégulier, de mauvaise qualité, inégal ou en pente est à proscrire absolument sous peine de faire basculer le patient.
- La mise en service doit se faire avec le concours d'une personne habilitée qui procédera aux réglages de l'appareil, adaptés à la morphologie et aux besoins de l'utilisateur.

### PRÉSENTATION DU PRODUIT :

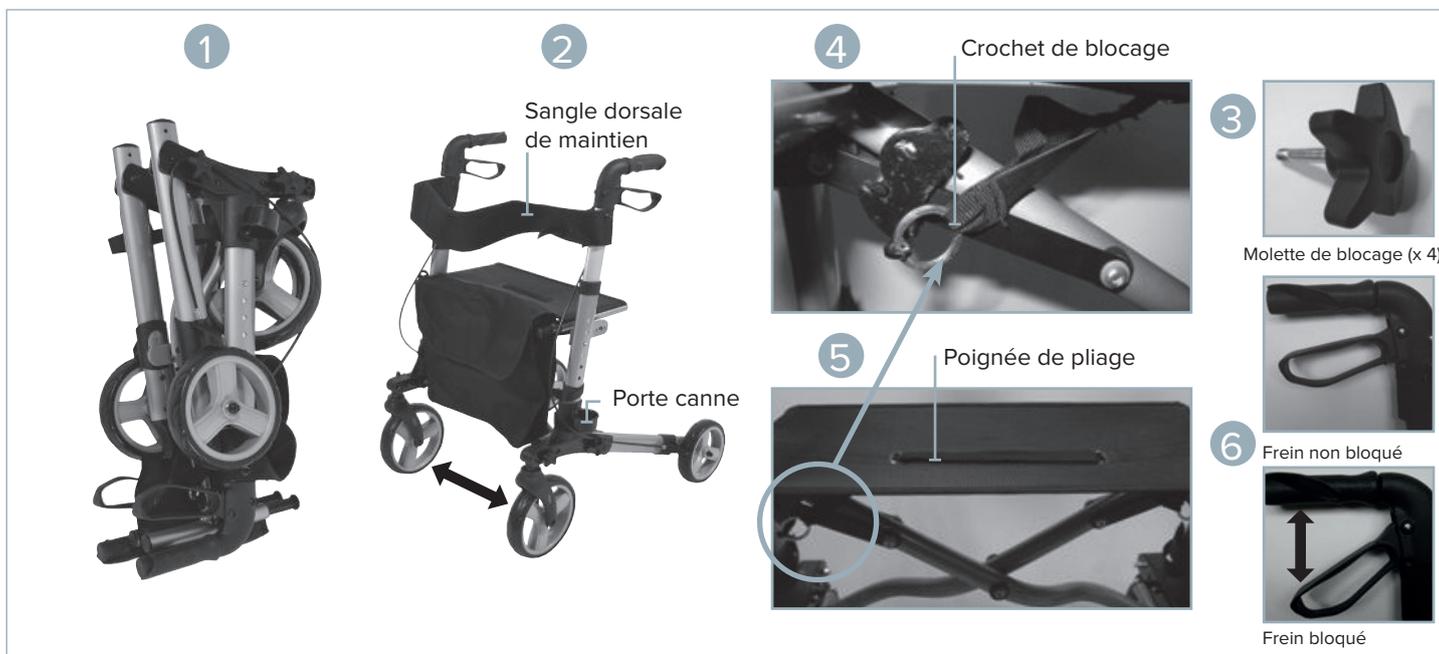

- Le rollator est livré plié (photo n°1). Les poignées sont abaissées à la position la plus basse. Un porte-canne est fixé sur le côté gauche du châssis.

- Poser le rollator sur une surface plane. Dévisser les molettes (2 de chaque côté) (photo n°3) puis dégrafer les bandes Velcro de maintien. Abaisser ensuite les roues arrière et faire pivoter les roues avant pour déplier le châssis. Fixer l'ensemble en vissant de chaque côté les 2 molettes.

- Positionner le rollator au sol sur ses roues. Ecarter simultanément les deux demi-côtés (photo n°2) et appuyer latéralement sur les croisillons pour enclencher le crochet de blocage situé sous le siège à gauche (photo n°4) jusqu'à ce que le mécanisme soit totalement verrouillé.

- Contrôler l'état général, vérifier la présence, le serrage et le verrouillage de tous les éléments mécaniques.

- Procéder au réglage en hauteur des poignées en appuyant sur le bouton poussoir puis en couissant le tube. Relâcher une fois la position souhaitée obtenue (au même niveau de chaque côté) en s'assurant du verrouillage correct.

- Contrôler la fixation de la sangle dorsale de maintien.

**⚠ Attention : S'assurer que les 4 molettes sont complètement vissées et que les 2 boutons poussoirs sont bien enclenchés. Ne pas positionner les doigts au niveau des zones de pliage.**

- Vérifier l'accroche du sac de transport sur l'avant du rollator.

- Pour replier le rollator, il suffit simplement de tirer sur la poignée de pliage située au centre du siège (photo n°5).

### IMPORTANT :

- Le professionnel de santé doit s'assurer que le patient a les facultés mentales et physiques suffisantes pour utiliser en toute sécurité le rollator.
- Vérifier la stabilité du cadre du rollator et l'efficacité des freins et du verrouillage en position ouverte avant de le confier au patient.
- **Utilisation des freins (photo n°6) :** ils sont inopérants quand la poignée est en position horizontale. Pour freiner ou ralentir, tirer les poignées vers le haut. Pour immobiliser le rollator, pousser les poignées à fond vers le bas jusqu'à ce qu'elles soient verrouillées.
- S'asseoir sur le siège uniquement depuis l'intérieur du rollator et non pas par le devant. Ne pas se mettre debout sur le siège.
- Ne pas mettre trop de poids dans le sac (maximum 5 kg) afin de conserver toute la mobilité et fonctionnalité du rollator et éviter tout basculement.

### UTILISATION :

- Avant d'utiliser le rollator pour la première fois, vérifier que la hauteur des poignées est bien adaptée.
- Le positionner devant soi, tenir fermement les poignées tout en maintenant les freins. Lorsque le corps est en équilibre, relâcher les freins, pousser lentement le rollator vers l'avant puis freiner à nouveau (en tirant les poignées de frein vers le haut). Lorsque le rollator est parfaitement immobilisé, avancer à l'intérieur du cadre jusqu'à retrouver la position d'équilibre.
- Pour une station debout prolongée, immobiliser le rollator en poussant les poignées de frein vers le bas jusqu'à ce qu'elles soient verrouillées. Pour débloquer les freins, remonter les poignées en position horizontale (photo n°6).
- **Avant chaque utilisation vérifier la stabilité, le freinage et que le rollator est correctement verrouillé en position dépliée.**

### ENTRETIEN RÉGULIER :

- Eliminer systématiquement les salissures en utilisant une solution savonneuse suivie d'un séchage.
  - Vérifier régulièrement l'état du système de freinage, des roues, du siège et de la sangle; les remplacer dès qu'ils sont dégradés.
  - Vérifier régulièrement l'état des éléments de serrage, des tubes, des soudures et l'efficacité du freinage.
- Seul un technicien habilité peut procéder à la maintenance et au remplacement de pièces fournies exclusivement par Drive DeVilbiss Healthcare France.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Poids maximum utilisateur : .....  = 120 kg

Dimensions hors tout (lxp) : ..... 66 x 69 cm (photo n°2)

Encombrement plié (lpxh) : ..... 28 x 35 x 70 cm (photo n°1)

Hauteur réglable : ..... de 79 à 91,5 cm (poignées) [6 positions - pas = 2,5 cm]

Largeur utile entre roues arrière : ..... 45 cm

Diamètre roues ... (4 dont 2 pivotantes à l'avant) : 20 cm (avant) / 17,5 cm (arrière)

Hauteur siège : ..... 53 cm

Taille siège : ..... 45 x 22,5 cm

Couleur : ..... gris métallisé

Matière : ..... aluminium, plastique

Poids : ..... 7,6 kg

Charge maximum supportée par le sac : ..... 5 kg

### CONDITIONS DE GARANTIE :

La structure mécanique est garantie un an. Cette garantie correspond à un emploi normal de l'appareil et exclut toutes les avaries dues à un manque d'entretien, à une mauvaise utilisation ou à un non respect des recommandations émises. La garantie ne s'applique pas au matériel réparé ou modifié sans l'accord de Drive DeVilbiss Healthcare France.

La garantie ne couvre pas l'usure normale des matériaux et des pièces. Les emballages et le port restent à la charge du fournisseur final. Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts directs ou indirects.



Distributeur : Drive DeVilbiss Healthcare France  
Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie - ZAC du Ban la Dame  
BP19 - 54390 FROUARD - FRANCE  
Tél : 03 83 495 495 - Fax : 03 83 495 496



Ralon Medical Equipment Co., Ltd  
Xilian development zone, Jinsha, Danzao town,  
528222 Foshan, Guangdong - CHINE

**drive**  
**DeVilbiss**  
HEALTHCARE