


NOTICE D'UTILISATION

A lire attentivement avant toute utilisation du produit

HMS - VILGO
fabricants de matériel médical

TA 3905 - Cadre de marche fixe pliant

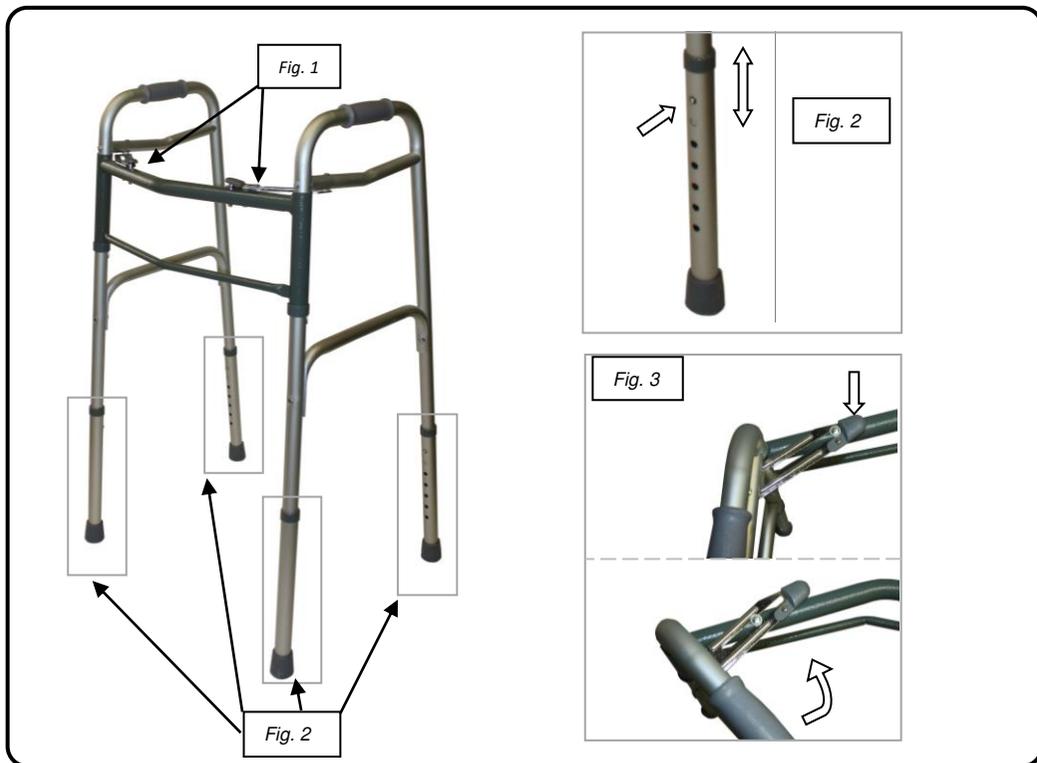

Caractéristiques techniques :

Châssis tubulaire : aluminium
Hauteur des poignées (mini/maxi): 775 / 925 mm
Dimensions : l=600 mm – P= 485 mm
Poids total: 2,5 kg
Poids maxi utilisateur : 120 kg



Remboursement (achat)



6259236

Produit conforme aux directives et normes européennes

Edition janvier 2021


www.hms-vilgo.com

NOTICE D'UTILISATION

A lire attentivement avant toute utilisation du produit

HMS - VILGO
fabricants de matériel médical

TA 3905 - Cadre de marche fixe pliant

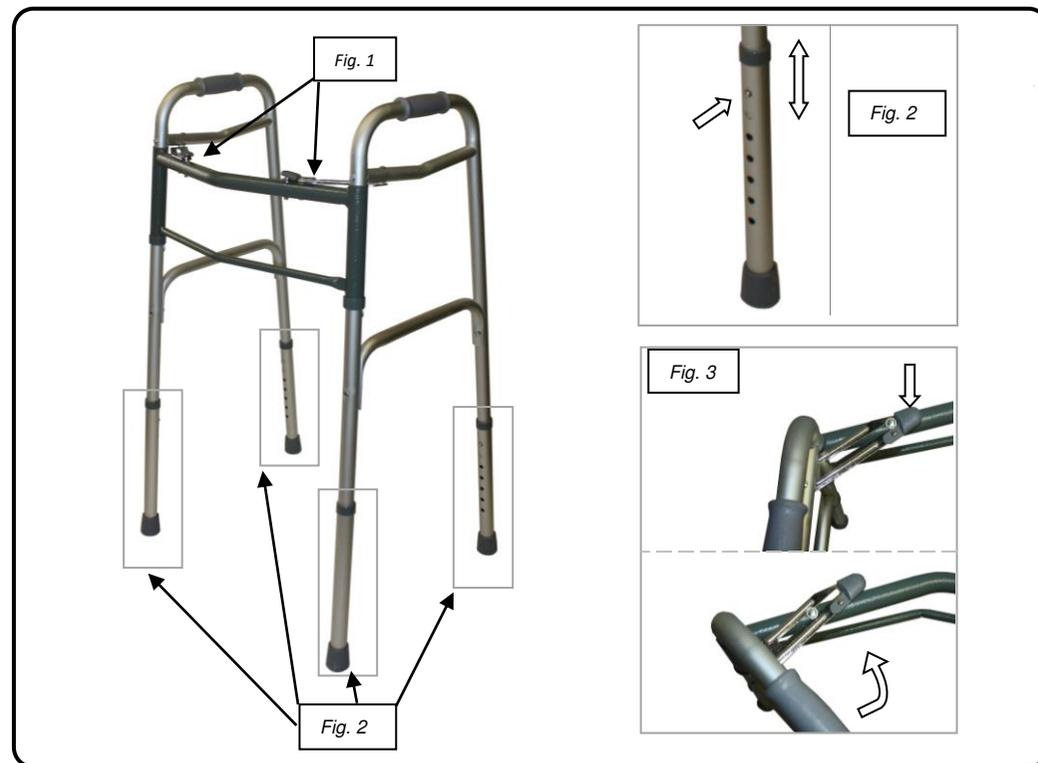

Caractéristiques techniques :

Châssis tubulaire : aluminium
Hauteur des poignées (mini/maxi): 775 / 925 mm
Dimensions : l=600 mm – P= 485 mm
Poids total: 2,5 kg
Poids maxi utilisateur : 120 kg



Remboursement (achat)



6259236

Produit conforme aux directives et normes européennes

Edition janvier 2021

www.hms-vilgo.com

NOTICE D'UTILISATION

TA 3905

Le cadre de marche fixe pliant référence TA 3905 est destiné aux personnes pouvant manquer d'équilibre et/ou ayant une mobilité réduite. Avec sa largeur inférieure à 65 cm il convient également à un usage en domicile privé. Une fois plié, le cadre de marche TA 3905 se rangera facilement.

CONSIGNES D'UTILISATION

Avant toute utilisation, vérifier que le produit vous soit livré en parfait état. **En cas de doute, contactez votre distributeur.**

Installation, mise en service :

1/ Pour déplier le cadre de marche : tirer sur les deux poignées vers l'extérieur jusqu'à l'enclenchement automatique du verrouillage de sécurité (**figure 1**).

2/ Régler la hauteur du cadre de marche : appuyer sur le bouton de réglage de chaque pied, et régler l'ensemble à la hauteur souhaitée (**figure 2**). **Bien enclencher le bouton de chaque pied.**

Tous les pieds doivent être ajustés à la même hauteur.

3/ Pour replier le cadre de marche (*afin d'en faciliter son transport ou son stockage*) : appuyer sur les boutons de déverrouillage (**figure 3**) sur chacun des côtés et replier les deux flancs.

Utilisation:

Assurez-vous que le cadre de marche est réglé à la bonne hauteur, et ne commencez à avancer que lorsque vous êtes bien droit et que vous avez saisi les poignées avec vos deux mains.

Soulever le cadre de marche pour le déplacer vers l'avant, puis une fois le cadre de marche stabilisé au sol, avancer d'un pas en prenant appui sur les poignées.

Consignes de sécurité:



- . Ne jamais actionner le bouton de déverrouillage lors des phases de déplacement.
- . Vérifier que chacun des pieds soient réglés à la même hauteur, bouton correctement enclenché.
- . Ne pas s'asseoir sur la traverse avant.
- . Utiliser le cadre de marche sur sol plan et stabilisé.
- . Contrôler régulièrement l'état des embouts et les remplacer dès que nécessaire.
- . Vérifier l'état du châssis et le serrage de l'ensemble de la visserie.

Nettoyage et entretien :

Effectuer le nettoyage avec un chiffon sec. Dans le cas de souillure importante, utiliser une éponge avec de l'eau chaude et un produit détergent.

Stocker ce produit à l'abri de l'humidité.

Garantie : 2 ans – contre tout vice de fabrication et défauts de matériaux. La garantie exclut les pièces soumises à usure naturelle ainsi que les dommages liés à des modifications apportées à la structure du produit, à une maintenance insuffisante, à une utilisation ou un stockage inappropriés, ou à l'utilisation de pièces autres que les pièces d'origine.

NOTICE D'UTILISATION

TA 3905

Le cadre de marche fixe pliant référence TA 3905 est destiné aux personnes pouvant manquer d'équilibre et/ou ayant une mobilité réduite. Avec sa largeur inférieure à 65 cm il convient également à un usage en domicile privé. Une fois plié, le cadre de marche TA 3905 se rangera facilement.

CONSIGNES D'UTILISATION

Avant toute utilisation, vérifier que le produit vous soit livré en parfait état. **En cas de doute, contactez votre distributeur.**

Installation, mise en service :

1/ Pour déplier le cadre de marche : Tirer sur les deux poignées vers l'extérieur jusqu'à l'enclenchement automatique du verrouillage de sécurité (**figure 1**).

2/ Régler la hauteur du cadre de marche : Appuyer sur le bouton de réglage de chaque pied, et régler l'ensemble à la hauteur souhaitée (**figure 2**). **Bien enclencher le bouton de chaque pied.**

Tous les pieds doivent être ajustés à la même hauteur.

3/ Pour replier le cadre de marche (*afin d'en faciliter son transport ou son stockage*) : appuyer sur le bouton de déverrouillage (**figure 3**) et replier les deux flancs.

Utilisation:

Assurez-vous que le cadre de marche est réglé à la bonne hauteur, et ne commencez à avancer que lorsque vous êtes bien droit et que vous avez saisi les poignées avec vos deux mains.

Soulever le cadre de marche pour le déplacer vers l'avant, puis une fois le cadre de marche stabilisé au sol, avancer d'un pas en prenant appui sur les poignées.

Consignes de sécurité:



- . Ne jamais actionner le bouton de déverrouillage lors des phases de déplacement.
- . Vérifier que chacun des pieds soient réglés à la même hauteur, bouton correctement enclenché.
- . Ne pas s'asseoir sur la traverse avant.
- . Utiliser le cadre de marche sur sol plan et stabilisé.
- . Contrôler régulièrement l'état des embouts et les remplacer dès que nécessaire.
- . Vérifier l'état du châssis et le serrage de l'ensemble de la visserie.

Nettoyage et entretien :

Effectuer le nettoyage avec un chiffon sec. Dans le cas de souillure importante, utiliser une éponge avec de l'eau chaude et un produit détergent.

Stocker ce produit à l'abri de l'humidité.

Garantie : 2 ans – contre tout vice de fabrication et défauts de matériaux. La garantie exclut les pièces soumises à usure naturelle ainsi que les dommages liés à des modifications apportées à la structure du produit, à une maintenance insuffisante, à une utilisation ou un stockage inappropriés, ou à l'utilisation de pièces autres que les pièces d'origine.